

投薬カート



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は大切に保管してください。

⚠ 注 意

この製品を管理される方を定め、下記の注意を守り正しくご使用ください。

- この製品は弊社投薬箱（別売り）や医療機器、小物類を保管・運搬するためのカートです。用途以外の使用はしないでください。
- この製品は屋内用です。屋外で使用したり、保管しないでください。
- 滑りにくく傾斜のない平坦な床面でご使用ください。
また、本体が動くおそれのある傾斜した場所には放置しないでください。
- 積載物は重量バランスをとり、安全に操作できる重量範囲でご使用ください。
（耐荷重 天板・棚板・底板：10kg、トレー受け：5kg）
- 移動時には周囲に目をくばり、人に対する安全を確かめてゆっくりと行ってください。
- 段差や凹凸のある場所ではゆっくりと慎重に移動してください。転倒や破損の原因になります。
- 扉に手・指などを挟まないようにご注意ください。
- 扉施錠用のカギは、紛失しないように大切に管理・保管してください。
- 天板上のシートは、長時間貼り付けたままの状態にすると吸着面がはがれにくくなる場合があります。
はがした時に吸着剤が本体に付着した場合は、ぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。
- 天板上のシートが濡れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。
濡れた状態で衣服などに触れると色移りする恐れがあります。
- 天板上のシートを洗濯した場合は、多少の縮みやシワが発生することがあります。
- 使用中にネジの緩みによるがたつきが生じた時は、早めに締め直してください。
- 火のそばや直射日光の当たる場所など、高温になる場所に置かないでください。
- 製品の分解、改造は、絶対にしないでください。

■お手入れの方法

- 汚れが付着したら固く絞った柔らかい布等で拭き取ってください。
汚れが落ちにくい場合には、中性洗剤をご使用ください。
- 天板上のシートを洗う場合は、ゆっくりとはがして取り外し、流水で表面の埃や汚れを洗い流してください。
洗浄後は、乾いた布で軽く水気を拭き取り、裏面が見えるように室内に陰干ししてください。
強くこすったり、しぼったり、もみ洗いはしないでください。また、乾燥機（タンブラー）、ドライヤー、アイロンのご使用は避けてください。シートの変形や破損、大きな縮みが発生し、再使用できなくなります。

■廃棄される場合

- 廃棄される場合は専門業者又は、公的機関にご相談ください。



品質表示	
本体	スチール

MADE IN JAPAN

 **CONDOR**
Trust of the Quality
山崎産業株式会社

第五営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号
TEL (03)5777-2002
MAIL Info2@yamazaki-sangyo.co.jp
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp