
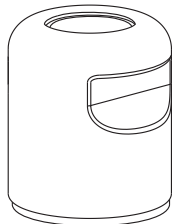


# 床置き式手すり「楽起」用 ウェイト5kg

(狭所用波型)

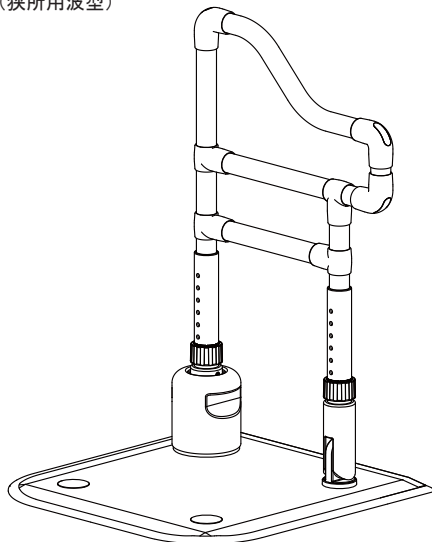

<対応する床置き式手すり「楽起」>

- ・横型
- ・縦型
- ・介助バー型
- ・ワイド縦型
- ・ワイド介助バー型
- ・狭所用波型

目次

△ 安全に関するご注意	・・・ P1
1. 設置上のご注意	・・・ P2
2. 使用上のご注意	・・・ P2
3. 各部名称および梱包内容	・・・ P3
4. 「楽起」への取り付け方法	・・・ P3
5. お手入れ方法	・・・ P4

**SAFETY** 安全に関するご注意

このたびは、床置き式手すり「楽起」用「ウェイト」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この説明書はお読みになった後もいつでも見れる場所に大切に保管してください。※床置き式手すり「楽起」の取扱説明書とあわせてご覧ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、ご本人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	○ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。
	● は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

## 1.設置上のご注意

<b>警告</b>		● 他社製品と組み合わせて使用しない。 破損や事故の原因になります。また、他社製品と組み合わせた場合の安全性は保証できません。
		● 製品の分解、改造は絶対にしない。 破損や事故の原因になります。
		● 「楽起」を「ウェイト」を取り付けた状態で移動させない。 破損や事故、ケガの原因になります。
<b>注意</b>		● 重量物のため取扱いには十分に注意する。持ち上げる際は必ず両手で持つ。 破損や事故、ケガの原因になります。
		● 設置後、ガタつきがないことを必ず確認する。 破損や事故の原因になります。
		● 定期的にガタつき、部品の破損がないことを確認する。
<b>注意</b>		● 屋外や直射日光の当たる場所には設置しない。 本製品は屋内用です。変質や変形、破損の原因になります。 金属部分が熱くなり、火傷の原因になります。
		● 火気を近づけたり、ストーブやヒーターのそばには設置しない。 火災や変質、変形、破損の原因になります。 金属部分が熱くなり、火傷の原因になります。
		● 浴室など、水気のある場所には設置しない。 変質や変形、破損の原因になります。
		● 製品の取り付けはできるだけ納入業者が行う。


## 2.使用上のご注意

<b>警告</b>		● 「楽起」の安定性向上以外の目的で使用しない。 「ウェイト」は「楽起」を使用する際の安定性を向上させる製品です。 踏み台など、本来の用途以外の目的で使用しますと事故やケガの原因になります。
		● 手すりの水平方向から、引っ張る、押すなど力を加えたり、体をぶつけたりしない。 水平方向から力を加えた場合、「楽起」が移動し、隙間ができる可能性があるので注意してください。 「ウェイト」は、「楽起」の安定性を向上させるものであり、固定するものではありません。
<b>注意</b>		● 殺虫剤などのスプレーを本製品に向けて噴射しない。 変質や変形、破損の原因になります。
		● 「楽起」との隙間に手や衣服などをはさまないように注意する。
		● お手入れの際は、取扱説明書に記載のお手入れ方法を確認する。 記載方法以外でお手入れを行った場合、変質や変形、破損のおそれがあります。

### 3.各部名称および梱包内容


記載部品が全て揃っているか、また破損や変形などしていないか確認してください。  
万が一、部品の不足や破損があった場合は、納入業者にご連絡ください。

<各部名称>

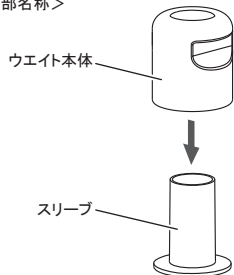

<梱包内容>

ウエイト本体×1  
スリーブ×1

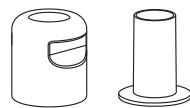

取扱説明書(本紙)×1

### 4.「楽起」への取り付け方法

※作業の前に「楽起」のヒンジのボルトが全てしっかりと締められていることを確認してください。  
※より安定させるため、「楽起」の最も体重をかける位置と反対側の支柱に取り付けてください。

1. ウエイト本体からスリーブを抜くようにして取り外します。
2. 「楽起」のストッパー用キャップをゆるめ、上にスライドさせます。(図1)
3. ストッパーを外します。(図2) 手ずりが急に落下しないよう、手ずりを手で支えた状態で行なってください。
4. 手ずりを上に引き抜いて、取り外します。
5. ①スリーブ、②ウエイト本体の順に支柱に上から取り付けます。(図3)
6. 手ずりを差し込み、高さを調整してストッパーを取り付けます。(図4)
7. ストッパー用キャップを締めます。(図5)

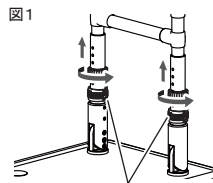


図1  
ストッパーが完全に見える位置まで  
キャップをスライドさせる

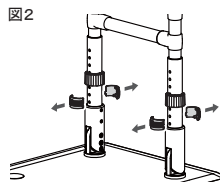


図2

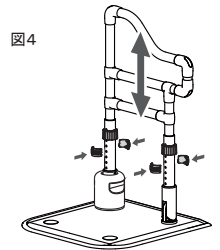


図4


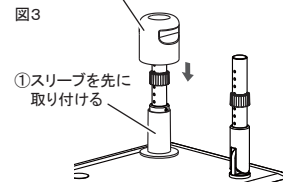


図3

図5

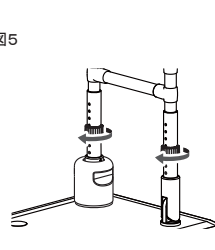

### 5.お手入れ方法

- 金属部分  
普段のお手入れ: 柔らかい布でから拭きしてください。  
汚れた時: 家具用クリーナーで拭き取ってください。
  - 樹脂部分  
普段のお手入れ: 柔らかい布でから拭きしてください。  
汚れた時: 薄めた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、仕上げに水拭きしてください。
  - 消毒方法  
アルコールを使用する場合: アルコール消毒剤を柔らかい布に吹きつけてから清拭してください。  
次亜塩素酸を使用する場合: 6%水溶液を100~200倍に希釈して清拭し、仕上げに水拭きしてください。
- ⚠注意
- 製品に60℃以上の温度を加えないでください。乾燥室をご使用の際は、室温を60℃以下に設定し、製品に直接熱風・熱気が当たらないようにしてください。製品の変形や破損の原因になります。
  - 汚れ具合により、期待通りの結果が得られない場合もあります。
  - 次亜塩素酸を希釈せずに使用したり、希釈溶液に浸漬させての消毒はおやめください。
  - 有機溶剤(シンナー・ベンジンなど)、殺虫剤、強酸性洗剤は使用しないでください。
  - オゾンガスは金属部分に影響を与えるため、使用しないでください。
  - 金属ブラシ、ナイロンたわしなどは傷をつけるため、使用しないでください。
  - 高圧洗浄機や水洗いはしないでください。サビなど劣化させる恐れがあります。
  - オートクレーブには対応していません。

※製品の仕様、外観等は、改良などにより、予告なしに変更することがあります。

**CONDOR**  
Trust in the Quality  
**山崎産業株式会社**

第五営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号  
TEL (03)5777-2002  
MAIL Inf05@yamazaki-sangyo.co.jp  
ホームページ [www.yamazaki-sangyo.co.jp](http://www.yamazaki-sangyo.co.jp)



20160316